


Cómo recolectar orina desde su casa

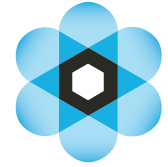

CIRRUSDX

El kit de recolección de muestras en el hogar para pruebas de infección de las vías urinarias contiene: (1) bolsa para muestras, (1) formulario de solicitud de la prueba, (1) vaso de orina etiquetado con el nombre y la fecha de nacimiento del paciente, (1) toallita de limpieza esterilizada, (1) paquete de devolución clínica FedEx prepagado.

Follow these steps:

Asegúrese	Asegúrese de que su información sea correcta en el formulario y en el vaso de recolección.
Escriba	Escriba la fecha en que ha recogido su muestra en el área resaltada del formulario.
Limpie	Lávese bien las manos. Limpie su area genital con cuidado utilizando la toallita esterilizada enviada en su kit.
Recolecte	Cuando orine, coloque el vaso en el flujo de orina. Cuando termine, cierre bien el tapon del vaso.
Empaque	Coloque su muestra en la bolsa para muestras y ciérrela. Coloque su formulario doblado en la funda exterior de la bolsa para muestras. Selle la bolsa para muestras en el paquete de devolución clínica FedEx prepagado.
Envíe	Llame al 1-800-GO-FEDEX para programar la recogida de su muestra. O deposítela en un buzón de FedEx o en un centro de envíos de FedEx.*

*Por favor, tome en cuenta que las muestras enviadas los viernes serán entregadas al laboratorio y procesadas los sábados.

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.

Llame al **1-240-813-8801** de lunes a viernes, de 8 a. m. a 9 p. m. hora del este. O envíenos un correo electrónico a: homecollection@cirrusdx.com