

# Cómo obtener una muestra vaginal en casa



CIRRUSDX

El kit de recolección de muestras en el hogar contiene: (1) bolsa para muestras, (1) formulario de solicitud de la prueba, (1) hisopo estéril y tubo NEST® etiquetado con el nombre y la fecha de nacimiento del paciente, (1) paquete de devolución clínica FedEx prepagado.

## Siga estos pasos:

<b>Asegúrese</b>	Asegúrese de que su información sea correcta en el formulario de solicitud de la prueba y en el tubo NEST®.
<b>Escriba</b>	Escriba la fecha en que recolecta su muestra en el área resaltada del formulario de solicitud de la prueba.
<b>Limpie</b>	Lávese bien las manos.
<b>Retire</b>	Saque con cuidado el hisopo del envoltorio sin tocar la punta blanda.
<b>Recolecte</b>	(1) Introduzca con cuidado el hisopo en la vagina aproximadamente 5 cm (2 pulgadas) más allá de la abertura vaginal. (2) Gire suavemente el hisopo contra la pared vaginal durante 10-30 segundos. (3) Con cuidado, saque el hisopo. (4) Coloque la punta blanda del hisopo en el tubo de recolección NEST®. (5) Quiebre el hisopo en la línea demarcada y enrosque firmemente el tapón del tubo NEST® con la punta blanda adentro.
<b>Empaque</b>	Coloque su muestra en la bolsa para muestras y ciérrela. Coloque su formulario de solicitud doblado en la funda exterior y selle la bolsa en el paquete de devolución clínica FedEx prepagada.
<b>Envíe</b>	Llame al <b>1-800-GO-FEDEX</b> para programar la recogida de su muestra. O deposítela en un buzón de FedEx o en un centro de envíos de FedEx.*

\*Por favor, tome en cuenta que las muestras enviadas los viernes serán entregadas al laboratorio y procesadas los sábados.

### ¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.

Llame al **1-240-813-8801** de lunes a viernes, de 8 a. m. a 9 p. m. hora del este. O envíenos un correo electrónico a: [homecollection@cirrusdx.com](mailto:homecollection@cirrusdx.com)