


Cómo obtener una muestra de semen en casa

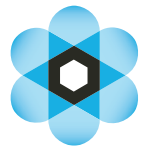

CIRRUSDX

El kit de recolección de muestras en el hogar contiene: (1) bolsa para muestras, (1) formulario de solicitud de la prueba, (1) vaso de recolección de muestras etiquetado con el nombre y la fecha de nacimiento del paciente, (1) toallita limpiadora estéril, (1) paquete de devolución clínica FedEx prepago.

Siga estos pasos:

Asegúrese	Asegúrese de que su información sea correcta en el formulario de solicitud de la prueba y en el vaso de recolección.
Escriba	Escriba la fecha en que recolecta su muestra en el área resaltada del formulario de solicitud de la prueba.
Limpie	Limpie su area genital con cuidado utilizando la toallita esterilizada enviada en su kit (enfocándose en la punta del pene).
Recolecte	(1) Retire la tapa del vaso de recolección. (2) Recoja la muestra durante masturbación, sin usar lubricantes ni saliva. (3) Eyacule en el vaso de recolección. (4) Cierre bien el vaso.
Empaque	Coloque su muestra en la bolsa para muestras y ciérrela. Coloque su formulario de solicitud doblado en la funda exterior y selle la bolsa en el paquete de devolución clínica FedEx prepagada.
Envíe	Llame al 1-800-GO-FEDEX para programar la recogida de su muestra. O deposítela en un buzón de FedEx o en un centro de envíos de FedEx.*

*Por favor, tome en cuenta que las muestras enviadas los viernes serán entregadas al laboratorio y procesadas los sábados.

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.

Llame al **1-240-813-8801** de lunes a viernes, de 8 a. m. a 9 p. m. hora del este. O envíenos un correo electrónico a: homecollection@cirrusdx.com